

INFORMACE K ODBĚRU CHLUPŮ U SKOTU


Pro izolaci DNA a určení genetického typu jsou třeba chlupové cibulky

- snažte se chlupy vytrhávat z neznečištěných míst - kořen ocasu, slabiny, kohoutek
- **NESTRÍHEJTE - VYTRHNĚTE** srst proti směru růstu
- zkontrolujte, zda srst obsahuje chlupové cibulky

Číslo vzorku:

VLEPTE VZOREK

Zde přelepte lepicí páskou

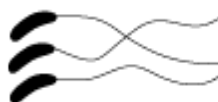

Chlupové cibulky

- papír přeložte a vložte do obálky
- přiložte vyplněnou objednávku na DNA test